

**Стоматологический
фантом пациента
мобильный**

МОДЕЛЬ: JG-C4

РУКОВОДСТВО

Производитель:

FOSHAN JINGLE MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Состав.....	3
Условия хранения и транспортировки.....	4
Установка.....	4
Обслуживание.....	6

ВНИМАНИЕ:

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ.

•Введение

Данное оборудование представляет собой оборудование для обучения, обучающихся классов, стоматологических университетов. Основная цель – улучшение практических навыков студентов перед началом работы, повышение их навыков при работе в определенных условиях, приближенных к реальным. Данный фантом включает следующие компоненты: тело фантома, голова фантома со съемной челюстью, ремни для крепления.

•Состав

(Примечание: без спинки кресла)

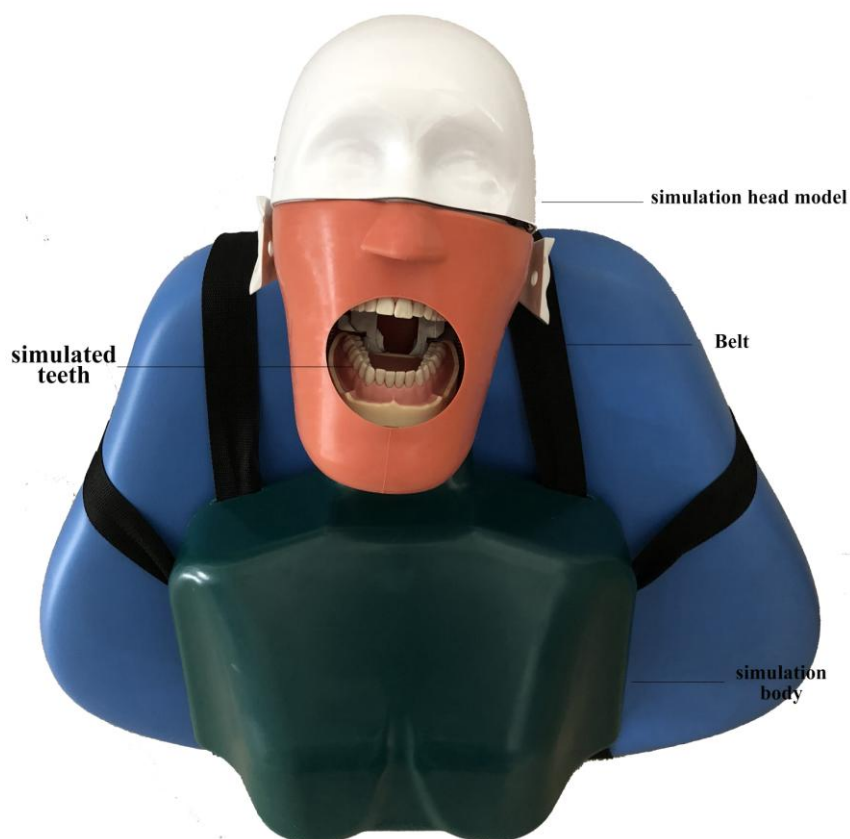


Figure 1

•Условия хранения и транспортировки

- A: Температура от -20°C до +40°C
- B: Относительная влажность не более 80%
- C: Атмосферное давление в диапазоне от 70кПа до 116кПа
- D: Необходима дополнительная защита от коррозии

•Установка

1. Проверка содержимого

Распакуйте коробку и проверьте оборудование на повреждения. Проверьте наличие всех компонентов в соответствии с упаковочным листом. В случае каких-либо проблем прекратите распаковку оборудования, сделайте фото и немедленно свяжитесь с дилером.

2. Сборка головы фантом

A. Поместите металлическую часть на затвор. См. рисунки 6,7,8.

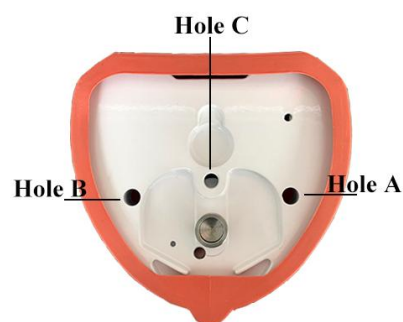


Figure 6



Cheek(front view)

Figure 7




Cheek with metallic part
(vertical view)

Figure 8

B. Совместите “Hole B” “Hole A” (рисунок 8) в соответствии с “Metallic part B” “Metallic part A”(рисунок 9), и “Screw 1” к “Hole C”(рисунок 8, 9). Закрутите

черную ручку “Handle” по часовой стрелке и зафиксируйте ее. (рисунок 10)

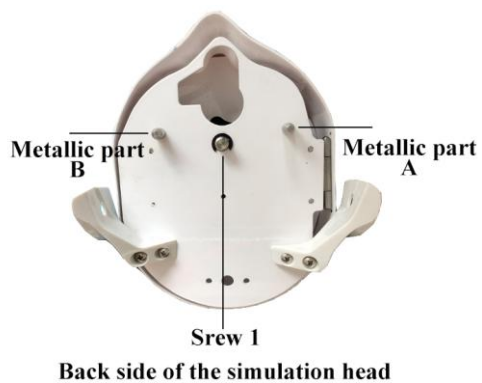

Back side of the simulation head

Figure 9



Figure 10

C. Закрепите голову и тело фантома при помощи болтов (обратите внимание на красные круги на рисунках 11,12).



Figure 11



Figure 12

D. Подстройте расположение головы. Прикрутите ручку, чтобы управлять расположением головы (рисунок 13). Голова может перемещаться в нескольких направлениях (рисунок 14).



Figure 13



Figure 14

● **Обслуживание**

1. Перед использованием убедитесь, что голова фантома хорошо закреплена.
2. Для чистки используйте только классический раствор для обработки медицинских изделий.